

# Télesuivi de l'apnée du sommeil à domicile

Suivez l'observance de vos patients



BOITIERS  
CONNECTÉS



PLATEFORME DM  
DES FABRICANTS




COMMUNICATION  
EN TEMPS RÉEL



DISPOSITIFS MÉDICAUX CONNECTÉS

# Must-Air Télésuivi

## Télésuivi de l'apnée du sommeil

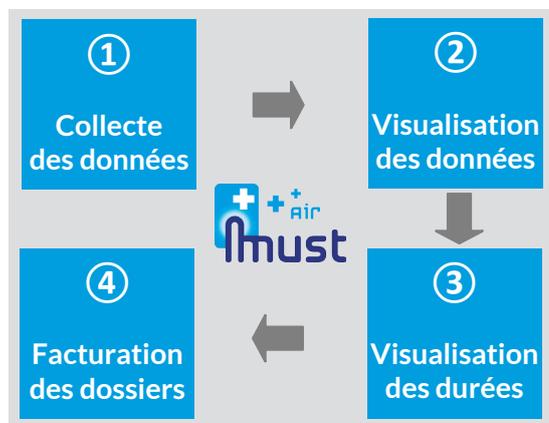

Afin de répondre aux nouvelles conditions de prise en charge des dispositifs médicaux de type PPC pour le traitement de l'apnée du sommeil, MUST vous fournit une **solution complète de télésuivi des PPC répondant aux exigences réglementaires** :

- Avis de projet au Journal Officiel du 11 juillet 2017
- Mise en application à partir du 01 janvier 2018
- Innovation des fabricants pour le suivi des résultats du traitement de PPC

## Respirez, on s'occupe de tout !

Notre module Must-Air Télésuivi est en conformité réglementaire et répond aux enjeux du Télésuivi de l'apnée du sommeil. Nous déploierons notre solution par étape, avec une livraison par lot de fonctionnalités pour une mise en oeuvre progressive.


- Communication avec les serveurs des fabricants RESMED et PHILIPS
- Connecteur Must pour les autres fabricants compatibles
- Gestion de l'appairage
- Suivi de l'observance
- Reconstitution des périodes
- Identification des seuils d'observance en fonction des règles
- Récupération d'autres indicateurs ;
- Tableaux de bord intégrant ces indicateurs ;
- Déclencheurs d'alertes ;
- Restitution de ces indicateurs
  - >> Environnement du prestataire
  - >> Vers un extranet prescripteurs
  - >> Vers une plateforme externe

# Fonctionnalités

## Gérez l'observance de vos patients

A partir des données brutes d'observance récupérées sur les plateformes des fabricants, Must-Air vous propose le bon **forfait** correspondant à l'observance de votre patient.

Vous suivez l'observance de vos patients, listez vos patients non-observants et consultez les statuts de période d'observance afin de mettre en place un **suivi médicotechnique**.

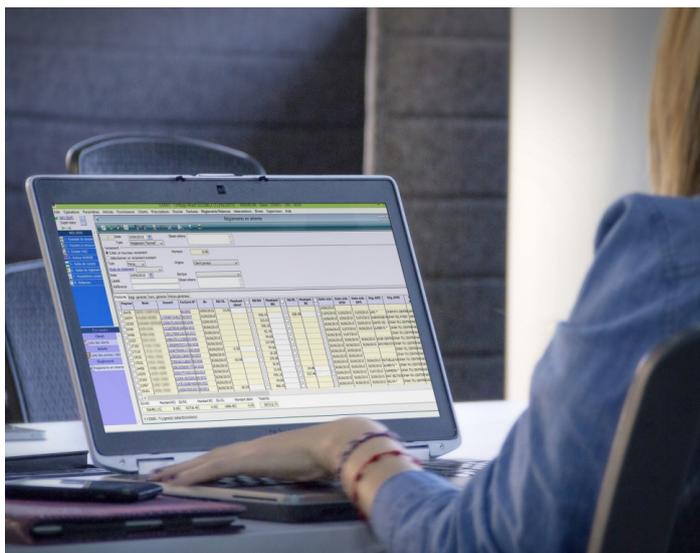

## Facturer avec le forfait adapté à l'observance du patient à domicile



PLATEFORMES FABRICANTS DM



DISPOSITIF  
MÉDICAL  
CONNECTÉ



DISPOSITIF  
MÉDICAL  
CONNECTÉ



DISPOSITIF  
MÉDICAL  
CONNECTÉ

Le Must-Air Télésuivi vient enrichir l'offre produit Must-Air G5. L'acquisition de ce module vous donne accès aux fonctionnalités suivantes :

>> **Données d'observance** : récupérez les données avec les connecteurs suivants :

- RESMED
- PHILIPS
- Lowenstein
- Sefam
- Srett
- DatamedCare
- Fisher & Paykel
- Connecteur Must



>> **Fiche Dispositif Médical adaptée à la nouvelle nomenclature** : référencez vos dispositifs patients et paramétrez vos articles et vos forfaits

>> **Observance & Période** : saisissez les périodes et les observances (PPC non télésuivi), suivez l'observance (tableau de contrôle) et calculez le forfait théorique (PPC Télésuivi - hors pédiatrique)

>> **Transition forfait 9.4** : disposez d'utilitaires Must afin de traiter en masse ces transitions.

# Les + du télésuivi Must



## 1 Prévision de visites NT / TL / PE : PRM Must

Non télésuivi / Télésuivi / Pédiatrie

- + Rechercher les patients à visiter
- + Créer les interventions
- + Recaler les interventions

## 2 Données Télésuivi accessibles depuis l'application Mobilité

- + Le technicien voit les données d'observance des 2 dernières périodes
- + Il sait rapidement si le consentement a été signé ou non
- + Il peut saisir une demande de changement de contexte suite à un changement de machine




### 3 Suivi des patients depuis l'Espace santé

#### → Accès prescripteurs



- + Liste des patients
- + Recherche de patients
- + Informations administratives et médicales (consultation de différentes constantes)
- + Visualisation des dispositifs et des consommables
- + Liste des interventions réalisées et prévues
- + Consultation des rapports de machines et comptes-rendus
- + Visualisation des données d'observances à la journée

#### Observance prescripteurs

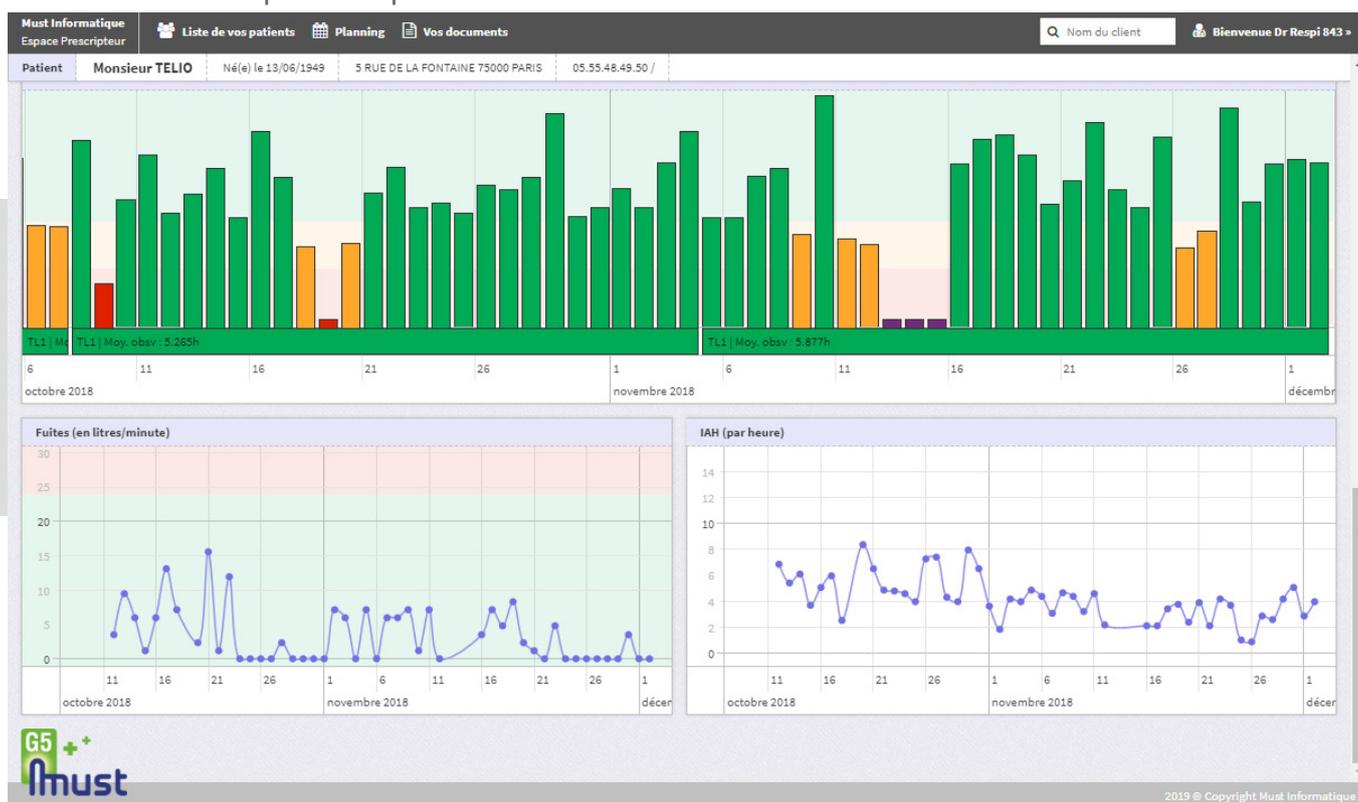

## → Accès patients



- + Consultation de ses informations administratives
- + Visualisation de ses informations médicales
- + Consultation de ses constantes
- + Interventions
- + Documents
- + Dispositifs et consommables
- + Visualisation des données d'observance à la journée

## → Accès médecins conseils des Caisses



- + Extraction des données d'observance

### Médecins conseils

Must Informatique Espace Prescripteur		Liste de vos patients		Bienvenue JOHN DOE-10002455 10002455 »				
Patient	DISP CLIENT NT 47818	77100 MEAUX						
Date début	Date fin	Calculée ou Forcée	Moyenne Calculée ou forcée	Forfait théorique	Nombre de jours d'interruption	Date	Observance	Id. Télésuivi
08/10/2018	04/11/2018	0h	0h	NT1	0	18/06/2018	265m	ARCHI_NT1
10/09/2018	07/10/2018	122.133h	4,362h	NT1	0	19/06/2018	354m	ARCHI_NT1
13/08/2018	09/09/2018	129.133h	4,612h	NT1	0	20/06/2018	193m	ARCHI_NT1
16/07/2018	12/08/2018	130.133h	4,648h	NT1	0	21/06/2018	255m	ARCHI_NT1
18/06/2018	15/07/2018	122.55h	4,377h	NT1	0	22/06/2018	196m	ARCHI_NT1
21/05/2018	17/06/2018	121.817h	4,351h	NT1	0	23/06/2018	197m	ARCHI_NT1
23/04/2018	20/05/2018	103.183h	3,685h	NT1	0	24/06/2018	266m	ARCHI_NT1
26/03/2018	22/04/2018	123.4h	4,407h	NT1	0	25/06/2018	390m	ARCHI_NT1
26/02/2018	25/03/2018	128.4h	4,586h	NT1	0	26/06/2018	183m	ARCHI_NT1
29/01/2018	25/02/2018	132.95h	4,748h	NT1	0	27/06/2018	401m	ARCHI_NT1
01/01/2018	28/01/2018	125.183h	4,471h	NT1	0	28/06/2018	272m	ARCHI_NT1
						29/06/2018	293m	ARCHI_NT1
						30/06/2018	314m	ARCHI_NT1
						01/07/2018	292m	ARCHI_NT1
						02/07/2018	153m	ARCHI_NT1

G5+  
Imust

2019 © Copyright Must Informatique

# Principe

**Gestion de son parc en adéquation avec sa patientèle pour une remontée des données d'observance permettant d'assurer une facturation en cohérence et respectant les points réglementaires propres au télésuivi**

## Fonctionnalités détaillées

- Gérer un dossier de télésuivi
- Créer un dispositif assurant adéquation entre dispositif médical et un patient
- Gérer, valider les données d'observance
- Facturer un patient possédant un dispositif médical et un forfait de télésuivi adapté à l'observance
- Corriger les erreurs inhérentes à la complexité du télésuivi
- Connaître la réglementation qui régit les règles de mesures d'observance et de transition de forfaits
- Mettre à jour le référentiel LPP
- Gérer les différents forfaits
  - >> Associer un forfait
  - >> Créer un forfait unique/ un forfait simple/ un forfait associé
  - >> Saisir un tarif
- Rapprocher les données entre un fournisseur et la G5
  - >> Comprendre le fonctionnement d'un dispositif patient
  - >> Créer/ mettre à jour un dispositif patient
  - >> Gérer/modifier l'historique d'un contexte
  - >> Gérer/modifier l'historique des périodes d'observance
- Traiter en masse ou de manière sélective les données
- Contrôler les collectes de données de contrôle patient
- Utiliser l'utilitaire de transition et de transfert de forfait
  - >> Vérifier et valider les conséquences dans les dossiers et les dispositifs
  - >> Vérifier et valider les conséquences sur la facturation de ces dossiers
- Gérer les cas particuliers
  - >> Gérer les hospitalisations
  - >> Gérer les dossiers des nouveaux patients post 2018
  - >> Gérer les dossiers professionnels
  - >> Corriger les dossiers en erreurs
  - >> Gérer un dossier pédiatrique



BOITIERS  
CONNECTÉS



PLATEFORME DM  
DES FABRICANTS



COMMUNICATION  
EN TEMPS RÉEL



DISPOSITIFS MÉDICAUX CONNECTÉS



# Avantages

Votre facturation s'adapte à l'observance du patient

## Conformité

Solution conforme à la réglementation  
Facturation conforme à la LPP avec prise en compte des données d'observance

## Traçabilité

Traçabilité de toute la chaîne de facturation  
Gestion de l'appairage

## Facturation optimisée

Intégration automatique des données de télésuivi provenant des fabricants  
Consultables depuis le dispositif  
Calcul et affectation du bon forfait à facturer

## Offre complète et intégrée

Solution couplée au **Front-Office Must**  
De la prise d'appel du Patient à la communication auprès du Prescripteur / Patient

>> *Plus de temps avec vos patients*



# Appairage du parc

## Phase préparatoire en amont de la mise en application de l'arrêté

Cette phase préparatoire importante concerne **l'appairage des dispositifs PPC** dans votre logiciel Must-Air G5 plusieurs mois avant l'exploitation des données.

Il est indispensable de gérer le lien entre la PPC du fabricant et la fiche correspondante dans Must-Air G5 afin d'enregistrer le numéro de série PPC en tant **qu'identifiant d'appairage**.

### Deux méthodes possibles

- >> Depuis le parc locatif G5 (méthode préconisée par MUST)
- >> Depuis le dispositif G5

Nom (C1)	Patient	Etz	Dossier N°	Début collecte	Fin de collecte	Moyenné	Mo. Recue	Jours Recus	Jours >= 4h	10/07	09/07	08/07	07/07	06/07	05/07	04/07	03/07	02/07	01/07	30/06	29/06	28/06	27/06
20020003			20020003	26/06/2014	08/07/2017	0,0	0,0	0	0														
20020004			20020004	26/06/2014	08/07/2017	7,8	8,4	13	12	7,0	11,1	8,6	6,8	8,9	7,4	10,4	8,5	9,3	9,2	9,5	8,9		
20020005			20020005	26/06/2014	08/07/2017	5,3	6,2	12	11	5,3	8,5	4,5	6,0	8,5	7,6	7,8	4,8	5,5	3,3	8,0	6,2		
20020006			20020006	26/06/2014	08/07/2017	8,1	7,1	12	14	7,7	6,5	7,4	6,2	7,9	7,7	6,5	8,6	5,5	6,8	8,8	6,2		
20020007			20020007	26/06/2014	08/07/2017	0,0	0,0	0	0														
20020008			20020008	26/06/2014	08/07/2017	2,1	7,2	4	3				8,4				10,0	8		8,0			
20020009			20020009	26/06/2014	08/07/2017	10,1	10,1	15	15	12,4	13,3	13,5	13,5	13,0	12,6	12,3	13,4	13,0	13,4	13,5	12,2	13,4	
20020010			20020010	26/06/2014	08/07/2017	3,2	4,9	9	8				4,8	10,8	5,3	5,1	6,2	8,7	9,2	9,2	8,7	8,4	
20020011			20020011	26/06/2014	08/07/2017	5,4	6,0	13	13	7,5	6,0	5,2	5,6	6,0	6,5	5,9	6,0	7,6	4,4	5,8	5,6	6,1	
20020012			20020012	26/06/2014	08/07/2017	0,0	0,0	0	0														
20020013			20020013	26/06/2014	08/07/2017	7,4	3,7	4	4				4,3			1,4	4,2	4,2	1,8	3,1	5,4	1,4	5,6
20020014			20020014	26/06/2014	08/07/2017	5,9	6,8	12	11	6,4	8,0	5,8	8,5	6,7	6,7	7,8	7,1	7,7	6,1	7,5	6,9		
20020015			20020015	26/06/2014	08/07/2017	0,0	0,0	0	0														
20020016			20020016	26/06/2014	08/07/2017	8,8	10,2	12	14	10,4	10,1	9,3	9,2	10,4	9,4	11,2	8,4	10,0	11,0	11,8	11,9		



Dispositif patient (528)

Patient: [dropdown], Id télé-observ: [input], Créé le: 25/06/2015 17:54:25, Créé par: MI

Type: PPC, Replacé le: [input], M&J le: [input], M&J par: [input]

Libellé: [input], N°: 528

Début collecte: 26/06/2014, Début analyse: 26/06/2014, Fin de collecte: [input]

Jours Recus: 922, Moyenne Jour: 10,1 Heures

Dernière collecte: 08/07/2017, Origine: RESMED2017, Id: 20140270492

Observé: Non, Type suivi: Non, Parc: [input]

Général Observance Périodes Détail

Demande arrêt complet	Non	Demande passage non télé-suivi à télé-suivi	Non
Date demande d'arrêt complet	[input]	Date demande de non télé-suivi vers télé-suivi	[input]
Date prise en compte d'arrêt complet	[input]	Date prise en compte de non télé-suivi vers télé-suivi	[input]
Demande passage télé-suivi à non télé-suivi	Non	Demande refus d'observance	Non
Date demande de télé-suivi vers non télé-suivi	[input]	Date demande de refus d'observance	[input]
Date prise en compte de télé-suivi vers non télé-suivi	[input]	Date prise en compte de refus d'observance	[input]

historique



Retrouvez-nous sur Facebook, Twitter et LinkedIn,  
Santé à domicile

Accédez à tous nos blogs depuis notre site Internet

f in ✉ 🐦

Rejoignez la solution des experts de l'assistance respiratoire à domicile

**LANCEZ-VOUS !**

Pour accéder à la présentation plus détaillée de nos modules Web, rendez-vous sur notre site [www.mustinformatique.com](http://www.mustinformatique.com)

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux  
**Must Santé à domicile**

